





Indicaciones de uso

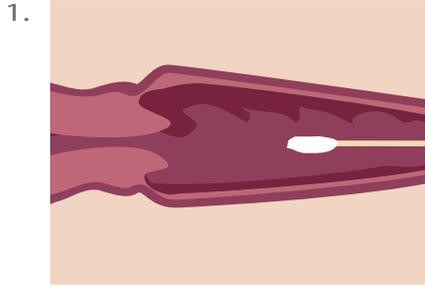

Recolectar la muestra de flujo vaginal con hisopo estéril, incluido en el test. (No es necesario espéculo)

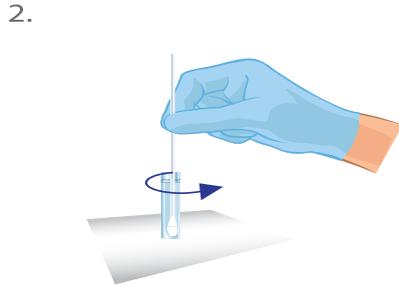


Enjuague el hisopo de la muestra en el vial de solvente. Descarte el hisopo.



Inserte la tira reactiva en el vial para iniciar el proceso de detección de PAMG-1
Tiempo de lectura: 10 minutos.



4.

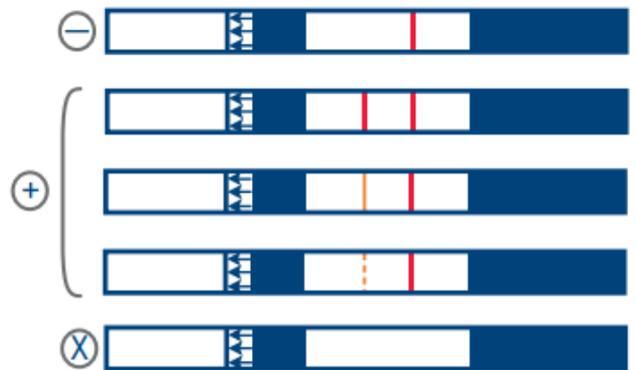

Interpretación de resultados.

*Refiérase al inserto del paquete para instrucciones completas de uso

Dos arterias, una vena y el tejido conjuntivo embrionario mucoso conforman el interior del Cordón Umbilical.

El tejido conjuntivo mucoso llamado gelatina de Wharton esta conformado por células mesenquimatosas, que luego se convertirán en fibroblastos, una matriz extracelular especializada compuesta principalmente por ácido hialurónico.



Detecta
la proteína
PAMG-1
para el tratamiento
oportuno
de la RPM
Ruptura Prematura de
Membranas Fetales



4A

Productos relacionados de interés



Tarjeta para determinar
Grupo Sanguíneo



Liqui Prep™
Kit Citología Líquida



099 871 0480 
(02) 280 0352
(04) 251 1738

Llámanos



CONFIDENCIALIDAD: Este documento contiene información de uso exclusivo de Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. Su distribución y reproducción total o parcial debe ser compartido para avances en salud y conocimiento universal.

Todos los derechos reservados por Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. 2021