



**Detecta**  
la proteína  
**PAMG-1**  
para el tratamiento  
**oportuno**  
de la **RPM**  
Ruptura Prematura de  
Membranas Fetales

## Contáctanos

Buscamos Distribuidores AmniSure<sup>®</sup>



098 728 8383   
(02) 280 0352



# La evidencia clínica apoya la **Precisión Diagnóstica.**

Con AmniSure® tendrá seguridad  
y confianza en su diagnóstico



## ¿Falsos negativos?

El diagnóstico incorrecto e inoportuno de RPM son dos factores de riesgo independientes de las complicaciones pre y post natales.



## ¿Infección intrauterina?

Si la paciente es dada de alta incorrectamente, o si la RPM no es tratada, podría desarrollar una infección intrauterina, resultando en complicaciones costosas.



## ¿Diagnóstico incorrecto?


El diagnóstico incorrecto de RPM puede llevar a intervenciones innecesarias e inapropiadas como hospitalización e inducción del trabajo de parto.



## ¿Muerte fetal?

Si una paciente con RPM es enviada a casa sin tratamiento, puede resultar en un desarrollo deficiente del feto.

# Resultados confiables

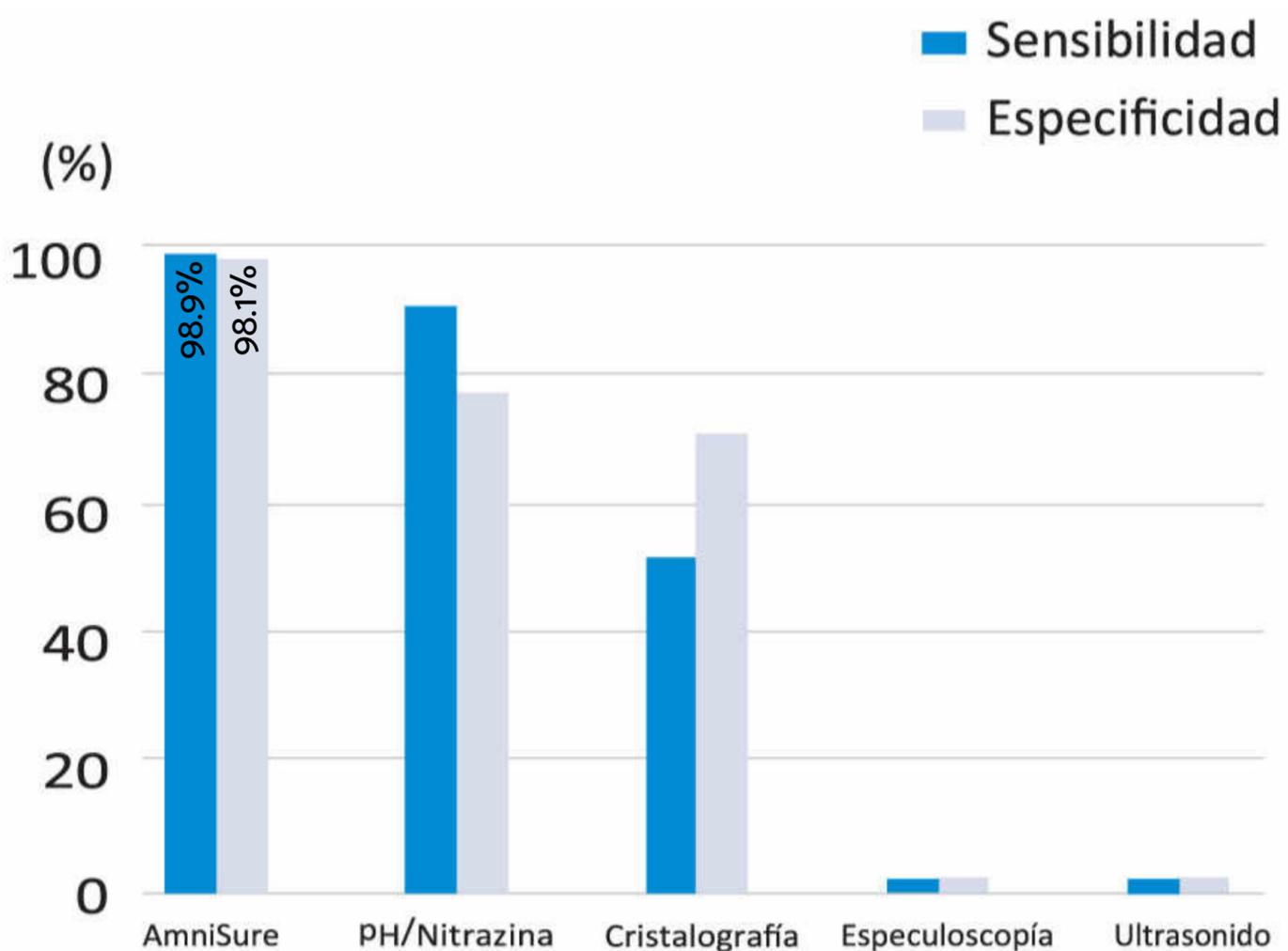

AmniSure<sup>®</sup> es el único método cuyos resultados son tan confiables como el test de Índigo Carmín, considerado como el "Gold Standard" en el diagnóstico de RPM, pero raramente utilizado por su invasividad.




Las pruebas de nitrazina, espe-culoscopia y cristalografía utilizadas en combinación, tienen un valor predictivo negativo (VPN) del 54.5% comparado con el 98.5% eficacia de la detección de PAMG-I con AmniSure<sup>®</sup>.

AmniSure<sup>®</sup> también provee resultados confiables en presencia de sustancias que comúnmente interfieren con los métodos tradicionales como:


- > Orina
- > Trazas de Sangre
- > Semen
- > Infecciones

# Indicaciones de uso

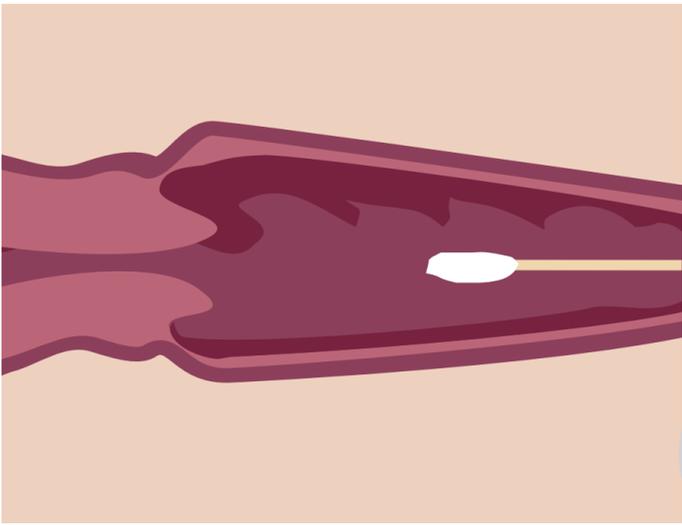

Recolectar la muestra de flujo vaginal con hisopo estéril, incluido en el test. (No es necesario espéculo)

2.

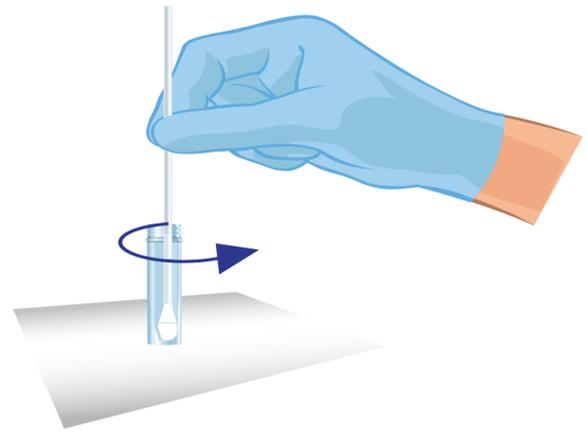


Enjuague el hisopo de la muestra en el vial de solvente. Descarte el hisopo.

3.



Inserte la tira reactiva en el vial para iniciar el proceso de detección de PAMG-1. Tiempo de lectura: 10 minutos.

4.

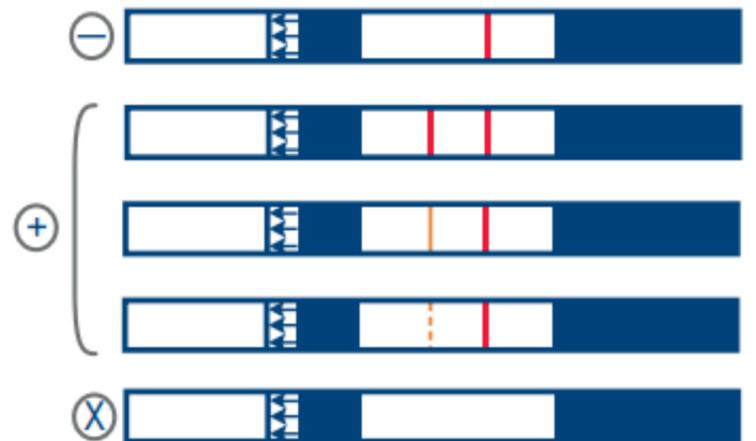

Interpretación de resultados.

\*Refiérase al inserto del paquete para instrucciones completas de uso



**Ver Video**

AmniSure® un test rápido, costo-efectivo y eficaz en comparación con otros.

Utilice AmniSure® como auxiliar diagnóstico de Ruptura Prematura de Membranas Fetales (RPM) para evitar gastos innecesarios, envíe con confianza a la paciente a casa, o administre el tratamiento adecuado oportunamente.

## Emergencia 24/7

FARMACIA

**FARADAY**

Ubicación en 



(02) 2441640

Distribuidor autorizado Amnisure®

## Tecnología

La Prueba RPM de AmniSure® **no requiere** un examen con espéculo y detecta específicamente la proteína Placentar Alpha Microglobulin-1 (PAMG-1) en el líquido amniótico. La muestra se toma con un hisopo estéril, que se inserta a una profundidad de 2-3 pulgadas (5-7 cm) en la vagina.

Se puede leer un resultado claro de "Sí / No" en minutos.

# Contáctanos

Si aún tiene dudas en la compra de AmniSure® o requiere asesoría contáctanos



## Diagnóstico

AmniSure® es una prueba rápida, confiable y no invasiva que ayuda en la detección de la Ruptura Prematura de Membranas Fetales (RPM) en mujeres embarazadas con signos y síntomas sugestivos de la afección.

Proporciona un diagnóstico fácil de interpretar, preciso y en tiempo que permite a los médicos tomar las medidas oportunas para prevenir complicaciones.



Matriz Quito

Sucursal Cuenca

Sucursal Guayaquil

Centro de Distribución

Pedregal N34-42 y Rumipamba

Av. Fray Vicente Solano 4-101 Edificio CICA oficina 207

Cdla. Kennedy Norte, V. Escalada y J. Castillo, Edificio SAI BABA – Oficina 104

Sebastián Moreno Oe1-308 y Mariano Cardenal

**(02) 2243 800**

**(02) 2435 401**

**(02) 2800 352**

**(04) 2685 590**

Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido educativo, eventos, capacitación, información, soporte y más...



**CONFIDENCIALIDAD:** Este documento contiene información de uso exclusivo de Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. Su distribución y reproducción total o parcial debe ser compartido para avances en salud y conocimiento universal.

Todos los derechos reservados por Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. 2023